

*fimA*TEST 検体採取マニュアル

安定した検査結果を得るために、下記の注意事項を守って実施してください。

- (1) 必ず歯石除去前に採材してください。
- (2) 検体採取には弊社指定のマイクロブラシまたは清潔な綿棒をお使いください。
- (3) 第4前臼歯周囲の歯と歯肉との境界を3往復ほど擦るか、歯周ポケットに直接挿入して十分な菌量が付着するようにしてください。
- (4) 汚染を防ぐため、採取時にマイクロブラシまたは綿棒が舌や唾液などに触れないようにしてください。
- (5) 他の菌の増殖を防ぐため、採取後にマイクロブラシまたは綿棒の先端を自然乾燥させてください。
- (6) チャック付ビニール袋に密閉、ご記名のうえご送付ください。

菌体量は 10^1 以下でも測定可能ですが、*P. gulae* 菌が存在しない、もしくは検出感度以下の場合には、判定不能になることがあります。ご了承下さい。